

Segufix Öryggisbelti fyrir rúm

Aðvörðun -Lesið áður en notkun hefst

Stærð Medium fyrir mittismál 80-120 cm

Lesið leiðbeiningarnar vel, röng notkun getur valdið alvarlegum slysum.

- * Beltið má adrei nota án þess að hliðarböndin (side straps) séu fest.
- * Möguleiki er á að mjög órólegir notandi komist yfri hliðargrindur rúmsins, þó svo og hliðargrindur séu uppi og hliðarbönd rétt fest. Í slíkum tilvikum er mælt með böndum yfir axlir til viðbótar mittisbeltinu.
- * Hliðargrindur verða að vera uppi.
- * Beltið þarf að festa tryggilega við rúmgrindina
- * Notið eingöngu á rúm með heilum hliðargrindum, ef hliðargrindur eru tvískipatar má nota beltíð ef bilinu milli tvískiptu grindanna er lokað (gap protector)
- * Nota verður rétta stærð af öryggisbelti samkvæmt mittismáli notandans
- * Festið beltíð ekki það þétt um miti notandans að það valdi óþægindum, en gætið þess að það sé ekki það laust að hægt sé að komast úr því.